

# Merkblatt für Einlagen

Kurzfassung des Merkblattes vom 01.09.1998 „orthopädische Einlagen“. Das ausführliche Merkblatt ist bei Winkler ORTHO SCHUH TECHNIK erhältlich.

Name: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

Geb. Datum: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

Strasse, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

## Informationen und Sicherheitshinweise

Mit Ihren neuen Einlagen haben Sie ein medizinisches Hilfsmittel im Sinne des Medizin-Produkte Gesetzes (MPG) erhalten. Es entspricht den Anforderungen des Anhangs I der EG Richtlinie 93/42/ EWG.

## Bitte beachten Sie daher die nachfolgenden Gebrauchsanweisungen sowie Hinweise

### Zweckbestimmung

Die Einlagen sind ein Hilfsmittel, das für Sie individuell angefertigt wurde. Sie sind nur in dafür geeignetem und passendem Schuhwerk zu tragen.

### Eingewöhnung

- Die Füße müssen sich an die korrigierende Einlage erst gewöhnen; tragen Sie sie am Anfang nur kürzere Zeit und steigern Sie kontinuierlich.
- Nach ca. 2 Wochen sollten sie ganztags bequem getragen werden können.

### Kontrolltermin

- Wenn die Einlagen unangenehm drücken oder reiben sofort
- Wenn vorhandene Schmerzen nicht nachlassen oder nicht wesentlich besser werden nach 2 Wochen
- Zur eventuellen Auffrischung oder Erneuerung nach 1- 2 Jahren
- Bei Kindern das erste Mal nach 4 Wochen  
nächste Mal nach 12 Monaten

### Diabetiker

Weisen Sie bei jedem Besuch und bei jeder Terminvereinbarung darauf hin, dass Sie Diabetiker sind!

*Patrick*  
**WINKLER**  
ORTHO SCHUH TECHNIK



Eidg. dipl. OSM  
Hammerstrasse 14  
(beim Wettsteinplatz)  
Tel. 061 691 00 66

zertifiziert nach EN 13485  
und EN 9001  
info@winkler-osm.ch  
www.winkler-osm.ch